



# COLOQUICK

A BETTER FUTURE



## GUÍA PARA APLICAR SILICONA AL RODAMIENTO

# Índice

Procedimiento y precauciones de seguridad .....	2
Herramientas necesarias .....	2
Guía de procedimiento .....	3

## Procedimiento y precauciones de seguridad

**En esta guía se muestra cómo se debe realizar el procedimiento de aplicación de silicona al rodamiento.**

- Los niños y las mascotas no deben dejarse sin supervisión con el coloQuick. Tenga especial cuidado cuando la cubierta y/o la puerta de servicio estén abiertas.
- Existe riesgo de descarga eléctrica cuando la puerta de servicio está abierta. Solo debe ser abierto por personal autorizado y formado por Calvex A/S.
- Este procedimiento solo debe ser realizado por personal autorizado y capacitado por Calvex A/S.

## Herramientas necesarias



Tubo de silicona (605010),  
dos rodamientos completos  
(8031010)

# Guía de procedimiento



Coloque el anillo de goma en el cojinete.



Use sus dedos para presionarlo en la ranura.



Aplique silicona SOLAMENTE a la superficie exterior del anillo de goma.



Distribuir la silicona por toda la superficie.



Repita el procedimiento con el segundo rodamiento.



Asegúrate de aplicar la silicona SOLO en el área marcada con un círculo verde en la imagen de arriba.



**Se recomienda dejar secar la silicona hasta el día siguiente antes de llenar el tanque con agua y calentarlo. Esto asegura que los cojinetes no tengan fugas. La silicona seca 2 mm en 24 horas.**



